

De kunst van  
precisie



Pro-Matrix<sup>®</sup>

Pro-Matrix®

Pro-Matrix®  
Curve



**4.5mm**  
SMALLE  
BAND

**6mm**  
BREDE  
BAND

**4.5mm**  
SMALLE BAND  
GEBOGEN

**6mm**  
BREDE BAND  
GEBOGEN

Art nr.: 19000  
50 stuks/pak

Art-nr.: 19005  
50 stuks/pak

Art-nr.: 19001  
50 stuks/pak

Art-nr.: 19006  
50 stuks/pak

“ Pro-Matrix is mijn favoriete matrixsysteem vanwege het gebruiksgemak, de veelzijdigheid en de uitstekende klinische resultaten. ”

Ash Rayare! BDS MFGDP(UK) Msc.  
Ash is de hoofd tandarts en eigenaar van  
Ash Dental Practice en Ash Aesthetics.

## Veel Gestelde Vragen

### Wat is het verschil tussen de vier kleuren?

**Groen:** Pro-Matrix smal (4,5 mm) voor premolaren en kinderen

**Blauw:** Pro-Matrix breed (6 mm) voor kiezen

**Geel:** Pro-Matrix Curve smal (4,5 mm) voor premolaren en kinderen

**Oranje:** Pro-Matrix Curve breed (6 mm) voor kiezen

### Wat is het voordeel van Pro-Matrix Curve?

De banden zijn voorgevormd voor natuurlijker ogende restauraties en meer voorspelbare contactpunten.

### Kan het worden gebruikt met wiggen?

Ja. Elke wig kan worden gebruikt.

### Hoe dik is de Pro-Matrixband?

0.04mm

### Kan het worden geautoclaveerd?

Nee. Dit product is een wegwerpproduct voor eenmalig gebruik.



### Wordt het steriel geleverd?

Nee. Het is schoon, gelijkwaardig aan andere typen matrixsystemen. Elke Pro-Matrix is individueel verpakt.

### Kan het zowel met composiet als amalgaam worden gebruikt?

Ja. Pro-Matrix is geschikt voor beiden vanwege het hoogspanningsmechanisme waardoor amalgaam kan worden samengeperst.

### Kan het worden gepolijst?


Ja. Vorm de band indien nodig met een geschikt polijstgereedschap.

### Is het mogelijk om meer dan één Pro-Matrix naast elkaar te gebruiken?

Ja. Ze passen strak naast elkaar voor patiënt-comfort en een uitstekende zichtbaarheid.



## Gebruiksaanwijzingen

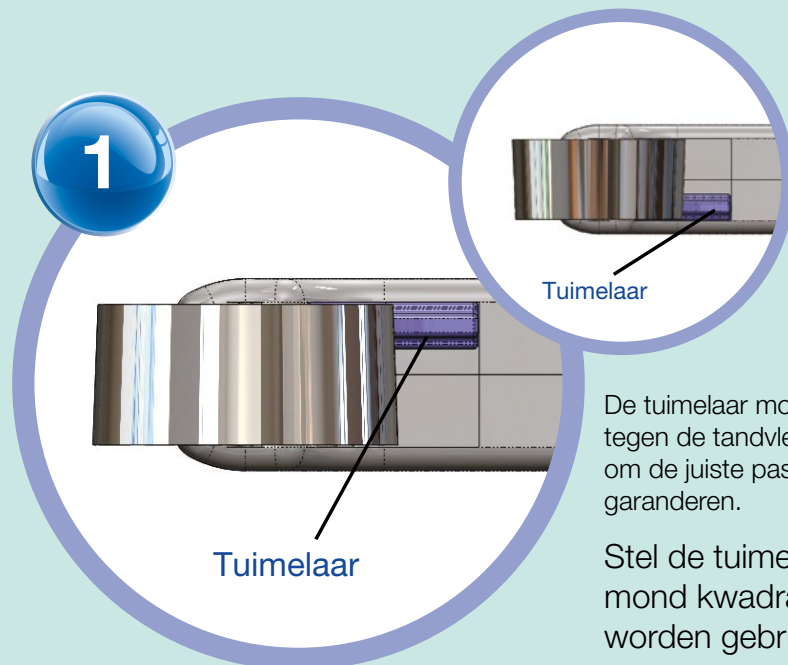

De tuimelaar moet zo dicht mogelijk tegen de tandvleesrand worden geplaatst om de juiste pasvorm rond de tand te garanderen.

Stel de tuimelaar voo gebruik af op het mond kwadrant waarin de Pro-Matrix zal worden gebruikt.



Plaats de band rond de tand en span aan door rechtsom aan het mechanisme te draaien. Niet te strak aanspannen. Draai de band linksom los voor grotere tanden.



Om de band te verwijderen, maakt u deze eerst los door de handgreep 2 tot 3 slagen linksom te draaien.



Voer de restauratie uit volgens de normale klinische procedure.



Breng wiggen aan en geef vorm aan de band met behulp van een geschikt polijstinstrument, indien nodig.

## Beheers de kunst van de precisie met Pro-Matrix®

Pro-Matrix is een matrixoplossing voor eenmalig gebruik voor restauraties met amalgaam en composiet voor gebruik in elke klasse. Verkrijgbaar als standaard matrixband Pro-Matrix en een gevormde band Pro-Matrix® Curve.

- **Op zichzelf staand product systeem** geen gereedschappen voor montage of toepassing vereist
- **Circumferentiële band** kan worden gebruikt voor MO/OD/MOD knobbelvervangingen
- **Mechanisme op hoge spanning** voor betere verdichting
- **Gemakkelijke aanpassing aan de tandvorm**
- **Smalle frontsectie** betere zichtbaarheid en meer comfort voor de patiënt
- **Geschikt voor gebruik met alle types restauratiematerialen**
- **Geschikt voor gebruik met wigen en rubberdammen**
- **Volledig wegwerpbaar**

### Pro-Matrix Curve heeft de extra voordelen

- Een voorgevormde tandvorm
- Een langere band voor grotere tanden

# YOUNG<sup>®</sup> INNOVATIONS

---



---

Young Innovations Europe GmbH

Mittermaierstr. 31 | D-69115 Heidelberg | Duitsland

DE: +49 (0) 6221 4345442 | info@ydnt.eu

GB: +353 (58) 45 966 | info@ydnt.eu

Voor meer informatie: [www.promatrixdental.nl](http://www.promatrixdental.nl)

AS-NL-PM/1122